



TAHÆSTHETIC
PROFESSIONAL

CLEAN & BALANCED con ND HYDRA BALANCE

Protocolos de trabajo

El equipo.

El equipo multifuncional de **ND Hydra Balance** combina varias tecnologías para adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de la piel del cliente. La hidrodermoabrasión es una técnica de limpieza en profundidad que proyecta líquidos sobre la piel mediante cabezales específicos. Esta tecnología limpia los poros y oxigena la piel a la vez que introduce activos específicos para el tratamiento elegido, ofreciendo una experiencia sensorial reconfortante y agradable.



Para trabajar con el equipo, se puede elegir entre varios manípulos:

- 1 Ultrasonidos.
- 2 Espátula ultrasónica.
- 3 Radiofrecuencia bipolar resistiva (HR).
- 4 Aerógrafo (spray).
- 5 Masajeador vibratorio.
- 6 Martillo frío / calor.
- 7 Hidrodermoabrasión – Hydrafusión, con cabezales intercambiables:

o Cabezales exfoliantes. Disponibles en dos tamaños. El tamaño pequeño es para zonas de difícil acceso, como la nariz; mientras que el tamaño grande es adecuado para el rostro y el escote.

o Cabezales redondos: Diseñados para pieles grasas y muy vascularizadas, estos cabezales tienen una baja absorción y una alta salida de producto. También están disponibles en dos tamaños, con el más pequeño para áreas de difícil acceso, como la nariz, y el más grande para el rostro y el escote.

o Cabezales silicona: Perfectos para pieles sensibles o muy vascularizadas, equilibran la salida de producto y la absorción. También vienen en dos tamaños: pequeño para zonas de difícil acceso, como la nariz, y grande para el rostro y el escote.



En **Tahesthetic** hemos desarrollado, dentro de nuestra línea de básicos de limpieza **Clean & Balanced**, productos específicos para sacar el máximo rendimiento al equipo ND Hydra Balance.





STEP 1 - PEEL

LOCIÓN TONIFICANTE CON ÁCIDOS Y NIACINAMIDA.

Loción tonificante que equilibra, purifica e hidrata la piel. Está formulada con ácidos como el ácido Cítrico, Láctico, Málico y glicólico que ayudan a eliminar el tapón comedogénico, y con activos como la Niacinamida, que aporta luminosidad.

Activos:

- Ácido Cítrico. Reduce el pH y actúa como antioxidante.
- Niacinamida. Equilibra la homeostasis de la piel, ayuda a eliminar las impurezas, mejora la apariencia en pieles secas y reduce las marcas de expresión.
- Ácido Láctico. Hidrata y mejora la elasticidad de la piel.
- Ácido Glicólico. Favorece la renovación celular de las capas superiores a través de la exfoliación.
- Ácido Málico: Acción exfoliante, antienvjecimiento y antimanchas.

Beneficios: Tonifica, equilibra, purifica e hidrata la piel. Exfoliante progresivo. Aporta luminosidad a la piel.



STEP 2 - HYDRA

LOCIÓN LIMPIADORA E HIDRATANTE CON FLOR DE LOTO.

Loción limpiadora e hidratante que mejora la firmeza y la hidratación de la piel. Reduce arrugas y estimula la producción de Colágeno, mejorando los signos de la edad para una piel radiante e hidratada. Ideal tanto para pieles maduras como jóvenes, gracias a sus potentes propiedades antioxidantes.

Activos:

- Saponinas. Reducen notablemente la hipersecreción sebácea.
- Flor de Loto. Protege la piel de las agresiones externas, limpia e hidrata la piel del rostro.

Beneficios: Controla la secreción sebácea. Reduce poros abiertos. Aporta luminosidad, elasticidad y firmeza. Reduce las arrugas. Hidratación profunda. Limpia en profundidad. Propiedades antioxidantes. Unifica el tono de la piel.



STEP 3 - REAFFIRMS

TÓNICO REAFIRMANTE CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO.

Tónico reafirmante formulado específicamente para potenciar los resultados de tu tratamiento ND Hydra Balance. Combina ingredientes de alta eficacia para proporcionar una acción reafirmante y revitalizante, dejando la piel más firme, luminosa y rejuvenecida.

Activos:

- Ácido Hialurónico: Hidratante profundo que mejora la elasticidad de la piel.
- Booster de Colágeno: Promueve la firmeza y elasticidad, reduciendo la apariencia de líneas finas.

Beneficios: Reafirma y Tonifica: Con una potente mezcla de activos tecnológicos que promueven la síntesis de colágeno. Ayuda a mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, combatiendo los signos de flacidez y envejecimiento, mejorando así la estructura de la piel. Hidratación Profunda: Enriquecido con Ácido Hialurónico, proporciona una hidratación intensa y duradera, dejando la piel suave y radiante.

Protocolos de trabajo con **ND HYDRA BALANCE**



Paso previo.

Acogida del cliente

Tempo stimato: 15 min.

1. Establece contacto visual con la cliente y cuida los primeros segundos, dándole una cálida bienvenida.
2. Entrega la bata y zapatillas.
3. Acompaña a la camilla y ayuda a acomodarla en decúbito supino.
4. Pulveriza el ambiente con Lotus Thermal Water para crear un clima más agradable.
5. Realiza un ligero masaje para que el cliente se relaje y empiece a disfrutar de la experiencia del ritual.
 - a. Comienza con unas ligeras presiones con manos alternas desde los pies, subiendo por todo el cuerpo, hasta llegar a los hombros.
 - b. Finalmente, desliza las manos por el pecho hasta llegar al esternón, donde ejercerás ligeras presiones con las palmas de las manos al ritmo de la respiración del cliente.

Protocolo de tratamiento facial. **Higiene**

Protocolo de tratamiento facial. **Hidro-Reafirmante**

Protocolo de tratamiento facial. **Hidro-Regenerador**

Protocolo de tratamiento capilar. **Higiene**

Protocolo de trabajo facial. **Higiene** con **ND HYDRA BALANCE**

La higiene facial con ND HYDRA BALANCE es un tratamiento innovador que permite hacer una limpieza profunda sin causar molestias, logrando una piel limpia y desintoxicada. Este tratamiento no se limita a la hidrodermoabrasión (Hydrafusión), sino que se combina con otras tecnologías para potenciar la sesión, transformando una higiene básica en un tratamiento de hidratación profunda para la piel. Además, se utiliza el martillo frío-calor: primero se aplica calor para asegurar una absorción completa del producto y vasodilatación; luego se aplica frío para sellar y calmar la piel.

DIRIGIDO A

Pieles comedogénicas y pieles acnéicas.

BENEFICIOS

Estimula la renovación del tejido epidérmico.
Proporciona una acción revitalizante y de oxigenación de la piel.
Ofrece un efecto sedante y mejora la circulación.
Mejora el metabolismo celular.
Aumenta el índice de hidratación.

DURACIÓN DE LA SESIÓN

60 min

FRECUENCIA

Mínimo 6 sesiones cada 7 o 10 días

PRODUCTOS NECESARIOS

Lotus Biphasic Tonic. Lotus Cleansing Foam, Cleansing Acid Gel. Lotus Thermal Water. Thermal Mask. Peel Step 1. Hydra Step 2. Repair Treatment 1 ml. Shooting Facial mas. Sun Cream SPF 50+.



1

Desmaquillado e higiene facial.

Tiempo estimado: 10 minutos.

Lotus Biphasic Tonic. Loción bifásica desmaquillante que elimina el maquillaje de forma efectiva, incluso en zonas sensibles, como contorno de ojos y labios, sin causar irritación. Modo de empleo: Agitar antes de usar y aplicar sobre el rostro con la ayuda de un algodón, incluyendo ojos y labios.

Lotus Cleansing Milk. Emulsión facial limpiadora que elimina los restos de maquillaje e impurezas del rostro, dejando la piel totalmente reconfortada. Su fórmula combina activos dermoprotectores e hidratantes que aportan a la piel suavidad y protección. Modo de empleo: Repartir dos o tres pulsaciones de emulsión limpiadora en las manos y masajear suavemente con movimientos envolventes en rostro, cuello y escote, hasta que el maquillaje o impurezas se fundan con el producto. Retirar completamente con agua y con la ayuda de una suave toalla.

Lotus Cleansing Foam. Espuma facial limpiadora que elimina restos de maquillaje e impurezas del rostro, dejando la piel totalmente limpia. Su fórmula combina activos seborreguladoras y calmantes que aportan a la piel suavidad y protección. Modo de empleo: Repartir dos pulsaciones de la espuma en las manos y masajear suavemente con movimientos envolventes en rostro, cuello y escote, hasta que el maquillaje o impurezas se fundan con el producto. Retirar completamente con agua y con la ayuda de una suave toalla.

2

Diagnóstico facial.

Un diagnóstico facial es esencial para detectar las necesidades de la piel y ayudará a personalizar los tratamientos y determinar el protocolo más adecuado para cada caso.

Utilizaremos la **cámara de diagnóstico** para realizar las medidas indicadas por el equipo, observando cuidadosamente la imagen que muestra para obtener la máxima información. Una vez terminado el diagnóstico, el equipo **ND HYDRA BALANCE** recomendará los productos óptimos para el cliente, personalizando de esta forma el tratamiento.



3

Mascarilla efecto calor.

Tiempo estimado: 8 minutos

Aplicar 20-25 ml de **Thermal Mask** por el rostro utilizando un depresor para producir una vasodilatación y facilitar la extracción de comedones. Dejar actuar durante 5 minutos. Durante este tiempo, trabajar la mascarilla de forma lineal y simultánea con ayuda de dos pinceles. Para activar el calor, pulverizar el rostro con **Lotus Thermal Water**. Tras el tiempo de actuación, retirar con una toalla de rizo húmeda, asegurándose de eliminar cualquier resto en rostro y cuello.

4

ND HYDRA BALANCE.

Proceder con el tratamiento utilizando el equipo **ND Hydra Balance**, Que permite una limpieza profunda de la piel sin causar lesiones ni molestias al cliente. Se utilizarán cabezales específicos para cada tipo de piel junto con dos productos diferentes. Preparación del equipo: Llenar los envases A y B con **Peel Step 1** e **Hydra Step 2**, respectivamente.



Peel Step 1.

1. Utilizar el **manípulo de Hydrafusión**. Seleccionar uno de los cabezales con superficie exfoliante.
2. Ajustar la primera ruleta en "drill" y asegurarse de que la segunda ruleta seleccione el envase A.
3. Ajustar la absorción y salida de agua según la boquilla elegida (grande o pequeña).
4. Deslizar la boquilla seleccionada sobre el rostro, realizando movimientos lineales cortos desde el centro del rostro hacia la zona externa. Evitar pasadas muy largas para reducir la absorción y el riesgo de crear marcas.
5. Durante el proceso, utilizar una mano para realizar las pasadas y con la otra estirar la piel para evitar la aparición de posibles hematomas debido a la absorción prolongada.



Hydra Step 2.

1. Dependiendo del tipo de piel, seleccionar el cabezal adecuado: cabezal de silicona para pieles más sensibles y cabezal de plástico para pieles más resistentes.
2. Ajustar la absorción y la salida de líquido.
3. Seleccionar en el lateral el envase B.
4. Realizar movimientos cortos desde el centro del rostro hacia fuera, asegurándose de hacer solo una pasada por zona.

5

Penetración del activo.

Tiempo estimado: 10 minutos aproximadamente o hasta la absorción completa.

1. Aplicar previamente, con un pincel, 2 ml del vial **Repair Treatment** por todo el rostro, cuello y escote.
2. Utilizar el manípulo de **Espátula Ultrasónica**. Pasar la espátula por las zonas tratadas, realizando movimientos lineales y manteniendo la parte angular de la espátula hacia arriba.

Se pueden seleccionar dos tipos de corrientes:

- **Corriente continua:** Utilizada para arrastre y limpieza.
- **Corriente alterna:** Utilizada para penetrar el producto.

En este caso, utilizar la corriente alterna para estimular la piel y facilitar una penetración más profunda del producto. El equipo cuenta con 8 niveles de intensidad de corriente; se comenzará en el nivel 1 y se aumentará gradualmente, considerando la sensibilidad del cliente.



6

Sellado de activo y fase de calma.

Tiempo estimado: 12 minutos.

1. Seleccionar el **manípulo Martillo frío/calor** para aplicar "frío". Configurar el martillo a 0°C y presionar "Start".
2. Mientras el martillo se enfría, aplicar una pequeña cantidad de **Soothing Facial Mask** por todo el rostro, cuello y escote.
3. Realizar pasadas circulares y lineales con el martillo por el cuello, rostro y escote, trabajando durante 6 minutos en cada lado.



Para finalizar, se recomienda aplicar **Sun Cream SPF 50+** para proteger la piel del sol y prevenir manchas. Su fórmula, enriquecida con Ácido Hialurónico, deja la piel luminosa y suave, sin sensación grasa.

Protocolo de trabajo facial. **Hidro-Reafirmante** con **ND HYDRA BALANCE**

El tratamiento hidro-reafirmante permite realizar una limpieza en profundidad de la piel e introducir activos reafirmantes para obtener resultados óptimos desde las primeras sesiones. Estos resultados se logran mediante la combinación de la hidrodermoabrasión (Hydrafusión) con el Aerógrafo (que microniza el activo y favorece su penetración gracias al martillo de calor). El manípulo se trabajará con toques suaves sobre la superficie epidérmica, finalizando con ultrasonidos para mejorar la absorción.

DIRIGIDO A

Todo tipo de pieles que necesiten reafirmación, luminosidad, higiene, oxigenación y disminución de arrugas.

BENEFICIOS

- Estimula la renovación del tejido epidérmico.
- Acción revitalizante y de oxigenación de la piel.
- Efecto sedante y mejora de la circulación.
- Mejora del metabolismo celular.
- Aumenta el índice de hidratación.
- Estimula la regeneración tisular.
- Incremento de la permeabilidad de la piel

DURACIÓN DE LA SESIÓN

60 min

FRECUENCIA

Mínimo 6 sesiones cada 7 o 10 días

PRODUCTOS NECESARIOS

Lotus Biphasic Tonic, Lotus Cleansing Milk. Lotus Cleansing Foam. Lotus Thermal Water, Peel Step 1. Hydra Step 2. Reaffirms Step 3. Salicylic Acid. Lifting Treatment 2ml. Elixir 1920. Eye Cream 1920. Cream 1920. Sun Cream SPF 50+.



1

Desmaquillado e higiene facial.

Tiempo estimado: 10 minutos.

Lotus Biphasic Tonic. Loción bifásica desmaquillante que elimina el maquillaje de forma efectiva, incluso en zonas sensibles, como contorno de ojos y labios, sin causar irritación. Modo de empleo: Agitar antes de usar y aplicar sobre el rostro con la ayuda de un algodón, incluyendo ojos y labios.

Lotus Cleansing Milk. Emulsión facial limpiadora que elimina los restos de maquillaje e impurezas del rostro, dejando la piel totalmente reconfortada. Su fórmula combina activos dermoprotectores e hidratantes que aportan a la piel suavidad y protección. Modo de empleo: Repartir dos o tres pulsaciones de emulsión limpiadora en las manos y masajear suavemente con movimientos envolventes en rostro, cuello y escote, hasta que el maquillaje o impurezas se fundan con el producto. Retirar completamente con agua y con la ayuda de una suave toalla.

Lotus Cleansing Foam. Espuma facial limpiadora que elimina restos de maquillaje e impurezas del rostro, dejando la piel totalmente limpia. Su fórmula combina activos seborreguladoras y calmantes que aportan a la piel suavidad y protección. Modo de empleo: Repartir dos pulsaciones de la espuma en las manos y masajear suavemente con movimientos envolventes en rostro, cuello y escote, hasta que el maquillaje o impurezas se fundan con el producto. Retirar completamente con agua y con la ayuda de una suave toalla.

2

Diagnóstico facial.

Un diagnóstico facial es esencial para detectar las necesidades de la piel y ayudará a personalizar los tratamientos y determinar el protocolo más adecuado para cada caso.

Utilizaremos la **cámara de diagnóstico** para realizar las medidas indicadas por el equipo, observando cuidadosamente la imagen que muestra para obtener la máxima información. Una vez terminado el diagnóstico, el equipo **ND HYDRA BALANCE** recomendará los productos óptimos para el cliente, personalizando de esta forma el tratamiento.



3

Exfoliación y preparación de la piel.

Tiempo estimado: 6 minutos

Salicilic Acid: loción exfoliante que revitaliza e ilumina la piel, eliminando las células muertas y refinando los poros, evitando la formación de puntos negros y espinillas. Modo de empleo: Aplicar 4 ml en una gasa sobre el rostro generando una fricción en las zonas deseadas para potenciar el tratamiento. No es necesario su eliminación, salvo en los casos que genere algún tipo de alteración en la piel

4

ND HYDRA BALANCE.

Proceder con el tratamiento utilizando el equipo **ND Hydra Balance**. Inicialmente, se empleará la tecnología de Hydrafusión, que permite una limpieza profunda de la piel sin causar lesiones ni molestias al cliente. Se utilizarán cabezales específicos para cada tipo de piel junto con dos productos diferentes.

Preparación del equipo: Llenar los envases A, B y C con **Peel Step 1, Hydra Step 2 e Reaffirms Step 3**, respectivamente.



Peel Step 1.

1. Utilizar el **manípulo de Hydrafusión**. Seleccionar uno de los cabezales con superficie exfoliante.
2. Ajustar la primera ruleta en "drill" y asegurarse de que la segunda ruleta seleccione el envase A.
3. Ajustar la absorción y salida de agua según la boquilla elegida (grande o pequeña).
4. Deslizar la boquilla seleccionada sobre el rostro, realizando movimientos lineales cortos desde el centro del rostro hacia la zona externa. Evitar pasadas muy largas para reducir la absorción y el riesgo de crear marcas.
5. Durante el proceso, utilizar una mano para realizar las pasadas y con la otra estirar la piel para evitar la aparición de posibles hematomas debido a la absorción prolongada.



Hydra Step 2.

1. Dependiendo del tipo de piel, seleccionar el cabezal adecuado: cabezal de silicona para pieles más sensibles y cabezal de plástico para pieles más resistentes.
2. Ajustar la absorción y la salida de líquido.
3. Seleccionar en el lateral el envase B.
4. Realizar movimientos cortos desde el centro del rostro hacia fuera, asegurándose de hacer solo una pasada por zona.

Reaffirms Step 3.

1. Dependiendo del tipo de piel, seleccionanr el cabezal adecuado. El cabezal de silicona, para pieles más sensibles; y el cabezal de plástico, para pieles más resistentes.
2. Ajustar la absorción y la salida de líquido y seleccionar el envase C en el lateral.
3. Realizar movimientos cortos del centro del rostro hacia fuera. En caso de pieles sensibles, se recomienda hacer punteos por todo el rostro en lugar de deslizar. Es importante deslizar el cabezal solo una vez por cada línea. En pieles sensibles, realizar toques ligeros para evitar dañar la piel.

5

Penetración de activo.

Tiempo estimado: 15 minutos.

1. Utilizar el **manípulo de Martillo frío/calor**. Opción "Calor".



2. Para aumentar la irrigación sanguínea y la vasodilatación, trabajar el martillo calor con toques por todo el rostro cuello y escote durante 10 minutos aproximadamente. La intensidad la debe marcar el cliente.

3. A continuación, utilizar el **manípulo Aerógrafo**. Ajustar la ruleta en modo "spray". Introducir en el vial vacío del pulverizador de 2 a 4 ml de **Lifting Treatment**, rociar por todo el rostro y estimular con un leve teclado hasta su absorción.



6 Radiofrecuencia Resistiva.

Tiempo estimado: 10 minutos.

1. Utilizar el **manípulo de Radiofrecuencia bipolar (HR)**.
2. Para conseguir un efecto estiramiento en las arrugas más profundas, aplicar **Rose Gold Hyaluronic Acid** en las líneas de expresión y utilizar la radiofrecuencia resistiva. La intensidad se ajustará de acuerdo con la sensibilidad del cliente. Trabajar sobre las arrugas utilizando movimientos lineales, contrapuestos y en zigzag.



- **Elixir 1920**. Aplicar dos dosis en rostro, cuello y escote realizando un suave masaje con movimientos de lisajes y un ligero teclado.



- **Cream 1920**. Aplicar de 1ml a 3 ml de producto dependiendo de la zona de trabajo. Una vez extendido, para facilitar su penetración, utilizar el **manípulo de ultrasonidos**. Con este manípulo, realizar movimientos lineales y circulares (siempre ascendentes) por todo el rostro y cuello. Trabajar hasta su completa absorción.

Para finalizar, se recomienda aplicar **Sun Cream SPF 50+** para proteger la piel de los rayos solares y prevenir manchas. Su fórmula, enriquecida con Ácido Hialurónico, revela una piel luminosa y suave sin sensación grasa.

7 Sellado del activo y fase final.

Tiempo estimado: 12 minutos.

- Contorno de ojos **Eye Cream 1920**: Aplicar manualmente con movimientos en forma de '8' por toda la zona orbicular.

Protocolo de trabajo facial. **Hidro-Regenerador** con **ND HYDRA BALANCE**

El tratamiento hidro-regenerador combina la hidrodermoabrasión (Hydra-fusión) con la aplicación de activos regenerantes, logrando una limpieza profunda y una hidratación intensa de la piel. Este tratamiento está diseñado para ofrecer resultados visibles desde las primeras sesiones. La técnica empleada utiliza cabezales específicos que proyectan los activos mientras limpian los poros y oxigenan la piel. La sesión finaliza con la aplicación de ultrasonidos para potenciar la absorción de los activos.

DIRIGIDO A

Pieles que requieren limpieza profunda y regeneración.

BENEFICIOS

- Estimula la renovación del tejido epidérmico.
- Acción revitalizante y oxigenante de la piel.
- Efecto sedante y mejora de la circulación.
- Optimiza el metabolismo celular.
- Aumenta la hidratación de la piel.
- Estimula la regeneración tisular.
- Aumenta la permeabilidad cutánea.
- Mejora la regeneración y el tono de la piel.

DURACIÓN DE LA SESIÓN

60 min

FRECUENCIA

Mínimo 6 sesiones cada 7 o 10 días

PRODUCTOS NECESARIOS

Lotus Biphasic Tonic, Lotus Cleansing Milk, Lotus Cleansing Foam, Lotus Thermal Water, Peel Step 1, Hydra Step 2, Reaffirms Step 3, Salicylic Acid, Repair Treatment 2 ml, Vitamin Concentrate 2ml, Shoothing Facial Mask, Eye Cream 1960, Cream 1960 y Sun Cream SPF 50+.



1

Desmaquillado e higiene facial.

Tiempo estimado: 10 minutos.

Lotus Biphasic Tonic. Loción bifásica desmaquillante que elimina el maquillaje de forma efectiva, incluso en zonas sensibles, como contorno de ojos y labios, sin causar irritación. Modo de empleo: Agitar antes de usar y aplicar sobre el rostro con la ayuda de un algodón, incluyendo ojos y labios.

Lotus Cleansing Milk. Emulsión facial limpiadora que elimina los restos de maquillaje e impurezas del rostro, dejando la piel totalmente reconfortada. Su fórmula combina activos dermoprotectores e hidratantes que aportan a la piel suavidad y protección. Modo de empleo: Repartir dos o tres pulsaciones de emulsión limpiadora en las manos y masajear suavemente con movimientos envolventes en rostro, cuello y escote, hasta que el maquillaje o impurezas se fundan con el producto. Retirar completamente con agua y con la ayuda de una suave toalla.

Lotus Cleansing Foam. Espuma facial limpiadora que elimina restos de maquillaje e impurezas del rostro, dejando la piel totalmente limpia. Su fórmula combina activos seborreguladoras y calmantes que aportan a la piel suavidad y protección. Modo de empleo: Repartir dos pulsaciones de la espuma en las manos y masajear suavemente con movimientos envolventes en rostro, cuello y escote, hasta que el maquillaje o impurezas se fundan con el producto. Retirar completamente con agua y con la ayuda de una suave toalla.

2

Diagnóstico facial.

Un diagnóstico facial es esencial para detectar las necesidades de la piel y ayudará a personalizar los tratamientos y determinar el protocolo más adecuado para cada caso.

Utilizaremos la **cámara de diagnóstico** para realizar las medidas indicadas por el equipo, observando cuidadosamente la imagen que muestra para obtener la máxima información. Una vez terminado el diagnóstico, el equipo **ND HYDRA BALANCE** recomendará los productos óptimos para el cliente, personalizando de esta forma el tratamiento.



3

Exfoliación y preparación de la piel.

Tiempo estimado: 6 minutos

Salicilic Acid: loción exfoliante que revitaliza e ilumina la piel, eliminando las células muertas y refinando los poros, evitando la formación de puntos negros y espinillas. Modo de empleo: Aplicar 4 ml en una gasa sobre el rostro generando una fricción en las zonas deseadas para potenciar el tratamiento. No es necesario su eliminación, salvo en los casos que genere algún tipo de alteración en la piel

4

ND HYDRA BALANCE.

Proceder con el tratamiento utilizando el equipo **ND Hydra Balance**. Inicialmente, se empleará la tecnología de Hydrafusión, que permite una limpieza profunda de la piel sin causar lesiones ni molestias al cliente. Se utilizarán cabezales específicos para cada tipo de piel junto con dos productos diferentes.

Preparación del equipo: Llenar los envases A, B y C con **Peel Step 1, Hydra Step 2 e Reaffirms Step 3**, respectivamente.



Peel Step 1.

1. Utilizar el **manípulo de Hydrafusión**. Seleccionar uno de los cabezales con superficie exfoliante.
2. Ajustar la primera ruleta en "drill" y asegurarse de que la segunda ruleta seleccione el envase A.
3. Ajustar la absorción y salida de agua según la boquilla elegida (grande o pequeña).
4. Deslizar la boquilla seleccionada sobre el rostro, realizando movimientos lineales cortos desde el centro del rostro hacia la zona externa. Evitar pasadas muy largas para reducir la absorción y el riesgo de crear marcas.
5. Durante el proceso, utilizar una mano para realizar las pasadas y con la otra estirar la piel para evitar la aparición de posibles hematomas debido a la absorción prolongada.



Hydra Step 2.

1. Dependiendo del tipo de piel, seleccionar el cabezal adecuado: cabezal de silicona para pieles más sensibles y cabezal de plástico para pieles más resistentes.
2. Ajustar la absorción y la salida de líquido.
3. Seleccionar en el lateral el envase B.
4. Realizar movimientos cortos desde el centro del rostro hacia fuera, asegurándose de hacer solo una pasada por zona.

Reaffirms Step 3.

1. Dependiendo del tipo de piel, seleccionan el cabezal adecuado. El cabezal de silicona, para pieles más sensibles; y el cabezal de plástico, para pieles más resistentes.
2. Ajustar la absorción y la salida de líquido y seleccionar el envase C en el lateral.
3. Realizar movimientos cortos del centro del rostro hacia fuera. En caso de pieles sensibles, se recomienda hacer punteos por todo el rostro en lugar de deslizar. Es importante deslizar el cabezal solo una vez por cada línea. En pieles sensibles, realizar toques ligeros para evitar dañar la piel.

5

Penetración de activo.

Tiempo estimado: 15 minutos.

1. Utilizar el manipulador de **Espátula ultrasónica**: Aplicar 1 ml de **Repair Treatment** en el rostro con la ayuda de la



espátula ultrasónica. Utilizar la corriente alterna y colocar la espátula con la inclinación ascendente. Los movimientos serán lineales, sin presión y sin levantar el manipulador.

2. A continuación, utilizar el manipulador de Ultrasonidos.

3. Aplicar un vial de **Vitamin Concentrate** por toda la zona de trabajo. Una vez extendido, utilizar el **manipulador de ultrasonidos** para facilitar su penetración. Con este manipulador, realizar movimientos lineales y circulares (siempre ascendentes) por todo el rostro, trabajando hasta la completa absorción del producto.



6 Sellado del activo y fase final.

Tiempo estimado: 12 minutos.

- Contorno de ojos **Eye Cream 1960**. Aplicar manualmente con maniobras en 8 por toda la zona orbicular.
- **Elixir 1960**. Aplicar dos dosis en rostro, cuello y escote realizando un suave masaje con movimientos de lisajes y un ligero teclado.



- **Cream 1960**. Aplicar de 1 ml a 3 ml de producto, dependiendo de la zona de trabajo. Una vez extendido, utilizaremos el **manípulo de ultrasonidos** para facilitar su penetración. Con el manípulo, realizar movimientos lineales y circulares (siempre ascendentes) por todo el rostro y cuello, trabajando hasta la completa absorción del producto.

Para finalizar, se recomienda aplicar **Sun Cream SPF 50+** para proteger la piel de los rayos solares y prevenir manchas. Su fórmula, enriquecida con Ácido Hialurónico, revela una piel luminosa y suave sin sensación grasa.

Protocolo de trabajo **capilar. Higiene** con **ND HYDRA BALANCE**

El tratamiento de higiene en el cuero cabelludo tiene varios objetivos principalmente, como son: Eliminar residuos de productos (ceras, lacas, etc) e impurezas, regular y prevenir la acumulación de grasa, caspa, descamación y otros desequilibrios, desobstrucción de los folículos pilosos y, sobre todo, mejorar la salud capilar.

Una limpieza capilar profunda es fundamental para mantener un cuero cabelludo saludable, lo que resulta en un cabello más fuerte, brillante y con mejor crecimiento.

DIRIGIDO A

Cuero cabelludo que requiere limpieza profunda. Prevenir y tratar problemas capilares.

BENEFICIOS

Cuero cabelludo en equilibrio.
Cabello más saludable y brillante.
Estimulación del crecimiento del cabello.
Prevención de la caída del cabello.
Mejor absorción de nutrientes.

DURACIÓN DE LA SESIÓN


40-50 min dependiendo de la densidad capilar.

FRECUENCIA

1 vez cada 10 días, dando tiempo a la regeneración del cuero cabelludo.

PRODUCTOS NECESARIOS

Peel Step 1. Hydra Step 2. Peptide T98 Concentrate.

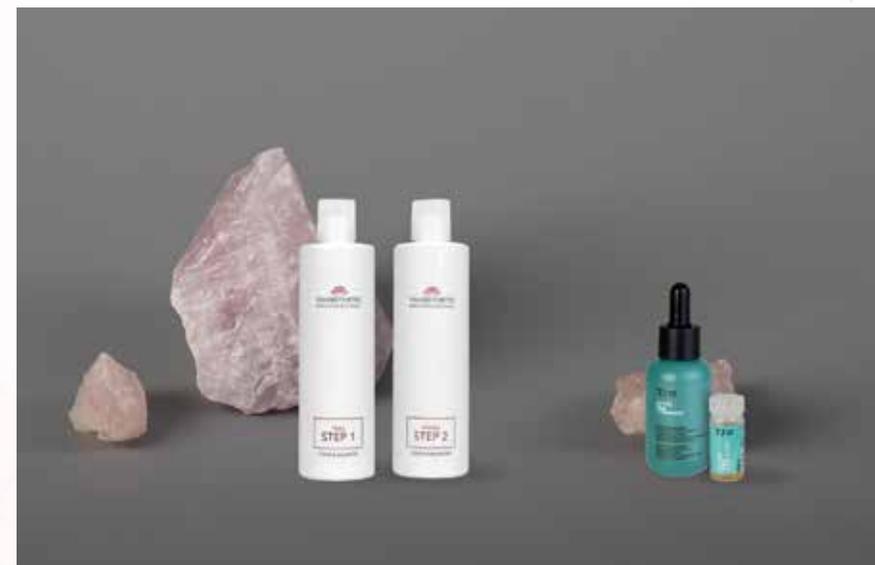

1

Preparación del cliente.

Para la realización del servicio el cliente deberá de estar sentado en un sillón o acostado en una camilla. Es fundamental que el cuero cabelludo esté limpio para realizar el tratamiento de manera efectiva. Por ello, se requiere que el cliente acuda con el cabello previamente lavado si no tenemos posibilidad de hacerlo en el salón.

2

ND HYDRA BALANCE.

Proceder con el tratamiento utilizando el equipo **ND Hydra Balance**. Inicialmente, se empleará la tecnología de Hydrafusión, que permite una limpieza profunda de la piel sin causar lesiones ni molestias al cliente. Se utilizarán cabezales de silicona en este caso.

Preparación del equipo: Llenar los envases A y B con **Peel Step 1** y **Hydra Step 2**, respectivamente.



Peel Step 1.

1. Utilizar el **manípulo de Hydrafusión**. Seleccionar un cabezal de silicona.
2. Ajustar la primera ruleta en "drill" y asegurarse de que la segunda ruleta seleccione el envase A.
3. Ajustar la absorción y salida de agua según la boquilla elegida (grande o pequeña).
4. Comenzar haciendo particiones lineales por el cuero cabelludo y realizar movimientos lineales cortos. Evitar hacer pasadas largas para minimizar el riesgo de aumentar la absorción y de crear marcas en la piel. Durante el proceso, usar una mano para realizar las pasadas y la otra para estirar para sujetar el pelo, evitando así la que el cabezal se debido a la absorción prolongada. Realizar únicamente una pasada por cada partición lineal.



Hydra Step 2.

1. Seleccionar el cabezal de silicona.
2. Ajustar la absorción y la salida de líquido.
3. Seleccionar en el lateral el envase B.
4. Repetir los movimientos y advertencias del paso anterior.

3 Introducción principio activo.

1. Utilizar el **manípulo de Aerógrafo**. Para ello, ajustar la ruleta en la posición de "spray".
2. Cargar el contenedor del aerógrafo con unos 2-3ml de **Take Peptide T98 Concentrate** y pulverizar de manera uniforme sobre todo el cuero cabelludo.
3. Una vez aplicada la loción, continuar aplicando aire hasta lograr la absorción completa del producto.



4 Sellado del tratamiento.

- 1 Utilizar el **manípulo de martillo frío/calor** y seleccionaremos la opción "frío" con la intensidad en 0.
- 2 Deslizar el manípulo sobre todo el cuero cabelludo, realizando movimientos lineales, durante 10 minutos, para optimizar la absorción del producto y mejorar la circulación sanguínea.





TAHĚSTHETIC
PROFESSIONAL

www.tahesthetic.pro