



TAHÆSTHETIC
PROFESSIONAL

MANUAL DE ELECTROPORACIÓN + NEEDLE

Dos técnicas estéticas en un solo tratamiento
para rejuvenecer la piel



¿QUÉ ES ELECTROPORACIÓN + NEEDLE?

Es una terapia para **rejuvenecer la piel** utilizando microagujas sin dejar cicatrices y potenciando el proceso natural de curación de la piel y el proceso de reorganización del colágeno.

Es la **nueva generación de tecnología** emergente que combina la punción automática y la electroporación para administrar un activo de manera eficaz.

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema **Needle**, a través de 9 microagujas, abre microcanales en la piel para aumentar su permeabilidad y activar el proceso de regeneración.

La **electroporación** se integra en estas microagujas administrando la entrada de activos a una mayor profundidad y conseguir mejores resultados.

EQUIPO

- **Cabezal recambiable:** posee 9 agujas con electroporación. Es necesario cambiar tras cada sesión (incluso con el mismo cliente), ya que las agujas están formadas por microfilamentos que se desgastan en cada uso. Para su introducción, verificar el punto medio y girar hasta su cierre.
- **Selección de profundidad:** permite seleccionar la profundidad de la aguja desde 0.0 hasta 1.0 mm. Valorar la sensibilidad del cliente para hacer el tratamiento tolerable. Se recomienda en facial no superar los 1,0 mm.

FACIAL	Zona gruesa	De 0.5 a 1 mm	De 3 a 4 pasadas
	Zona sensible	De 0.1 a 0.5 mm	
CAPILAR	Con Electroporación	De 0.1 a 0.5 mm	De 2 a 3 pasadas
	Sin Electroporación	De 0.5 a 1 mm	
CORPORAL	Zonas gruesas	De 0.5 a 1 mm	De 3 a 4 pasadas
	Zonas sensibles	De 0.5 a 1 mm	

• **Pantalla LCD**

1. Velocidad de la aguja.

Ajustable a 3 niveles (1 a 4000 revoluciones; de 2 a 4500 revoluciones; y de 3 a 5000 revoluciones por minuto). Se recomienda adaptar el nivel a la velocidad de nuestra mano al pasar por la piel.

2. Intensidad de electroporación.

- 0 sin electroporación.
- 1 y 2 baja intensidad baja.
- 3 intensidad media.
- 4 y 5 intensidad alta.

3. Control de tiempo. Por defecto, 30 minutos.




ND equipo médico estético



ND equipo estético

DIFERENCIA CON OTROS TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO	PROFUNDIDAD ALCANZADA
Aplicación tópica	200 micrómetros
Aplicación con microagujas	600 micrómetros
Aplicación con electroporación	600 micrómetros
Aplicación con microagujas + electroporación	1.000 micrómetros

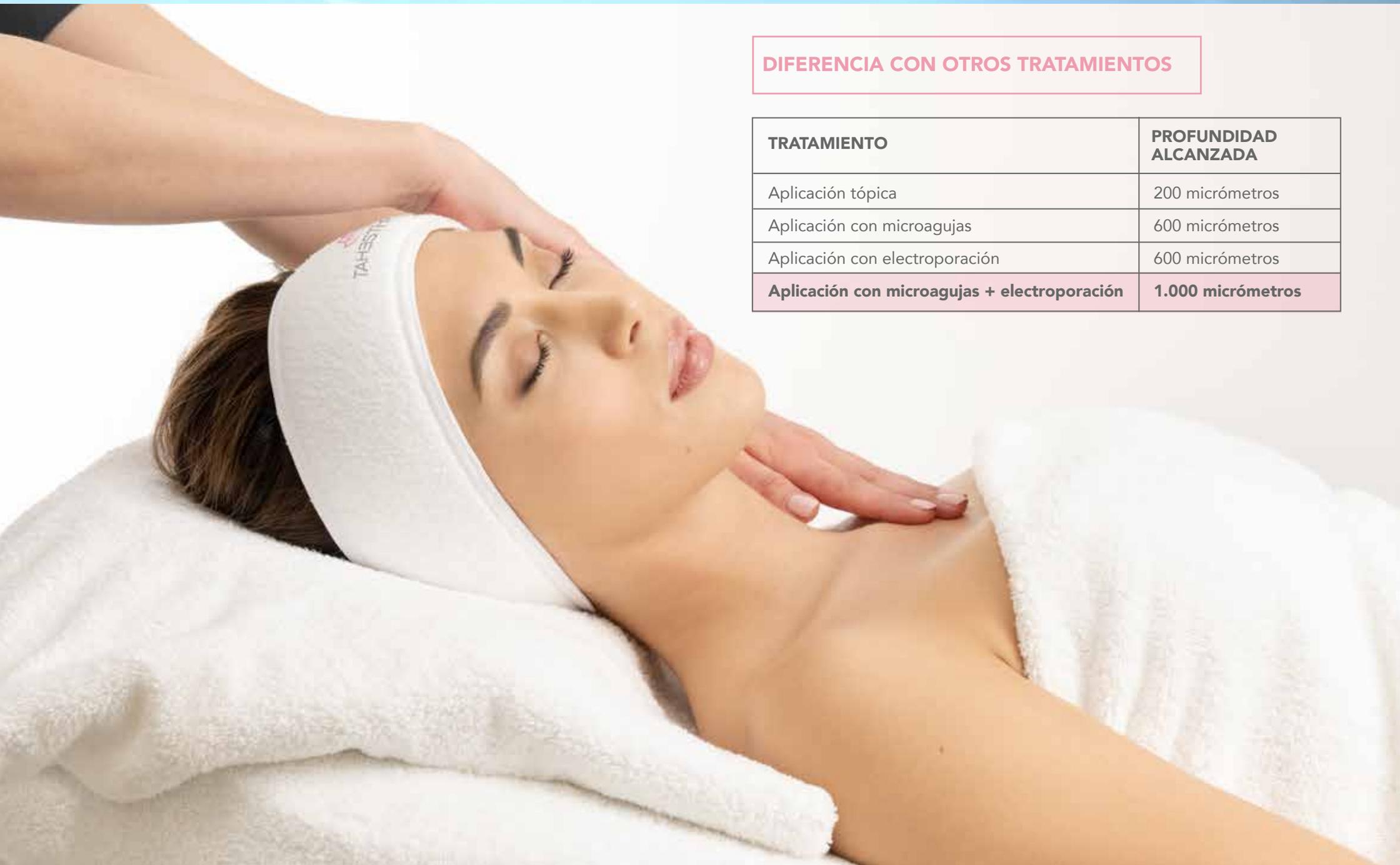



TÉCNICAS DE TRABAJO

- En forma de malla. Genera una activación de todo el tejido ante efectos contra la pérdida de juventud.
 1. Líneas verticales.
 2. Líneas horizontales.
 3. Diagonal derecha.
 4. Diagonal izquierda.
- En forma de espiral. Para zonas con poro dilatado.
- En forma de zigzag. Arrugas, estrías, cicatrices.
- Punteo. Perfil de los labios y zona periocular, con poca presión.

FACTORES QUE AUMENTA LA PENETRABILIDAD

- **Edad:** cuanto más joven, más permeable.
- **Localización:** a menor grosor del estrato corneo, más permeable.
- **Hidratación:** a mayor hidratación de la piel, más permeable.

PROTOCOLO DE TRABAJO COMÚN

Intervalo entre sesiones: 10 o 15 días.
Mantenimiento: una vez al mes.



PASO 1. Preparar la piel con una higiene facial.

- **Lotus Biphasic Tonic:** Loción bifásica desmaquillante que elimina el maquillaje de forma efectiva, incluso en zonas sensibles, como contorno de ojos y labios, sin irritarlos.

Modo de empleo: Agitamos antes de usar y aplicamos sobre el rostro con la ayuda de un algodón, incluyendo ojos y labios.

- **Lotus Cleansing Foam:** Espuma limpiadora facial que elimina eficazmente impurezas, restos de maquillaje y exceso de sebo del rostro, proporcionando una piel radiante y libre de impurezas.

Modo de empleo: Aplicar sobre la piel con un suave masaje circular para eliminar el maquillaje y el exceso de sebo del rostro. A continuación, retirar completamente con agua tibia y la ayuda de una suave toalla.

- **Lotus Thermal Water:** Loción tónica calmante que refresca, hidrata y cuida la piel del rostro, reduciendo la tirantez al instante y dejando la piel totalmente confortable y preparada para continuar con el ritual.

Modo de empleo: Pulverizar sobre el rostro y escote, a continuación, teclear la piel suavemente, hasta su total absorción.



PASO 2. Exfoliación de la piel.

Con **Salicylic Acid**, una loción exfoliante revitaliza e ilumina la piel, eliminando las células muertas y refinando los poros, evitando la formación de puntos negros y espinillas.

Modo de empleo: Aplicar 4 ml de producto en una gasa y aplicar sobre el rostro generando una fricción en las zonas deseadas para potenciar el tratamiento. No es necesario su eliminación, a no ser que genere algún tipo de alteración en la piel.

PASO 3. El tratamiento.

Elegir los viales, máximo recomendamos 3. La cantidad a la hora de trabajar varía entre 4 ml y 6 ml aproximadamente por tratamiento. Aconsejamos hacer las mezclas en nuestro MIXER(*), agitar y sacar con aguja. A continuación, con la jeringuilla sin aguja y con el uso de guantes ir repartiendo el vial por la zona a trabajar.

(*) Importante: Mixer es de un solo uso.

Comenzar por frente, a continuación cara lateral y, por último, orbicular de boca y ojos.

Importante:

- Después del tratamiento, dependiendo de la agresión y del tipo de piel del cliente, el área tratada estará sensibilizada. Esta sensibilidad puede durar de 24 a 48 horas.

- Para evitar efectos secundarios o indeseados, durante el tratamiento se recomienda no exponerse a fuentes de calor o elevadas exposiciones solares.

COMBINACIONES PROPUESTAS POR TAHĚSTHETIC

HIDRATANTE

Tecnología de última generación para una piel más firme, tersa e iluminada.

Este tratamiento está indicado especialmente para pieles deshidratadas y dañadas por agentes externos como la polución o los cambios climáticos. Con este tratamiento la piel recupera la elasticidad perdida y la hidratación necesaria para lucir un aspecto más saludable.

Además, combinando ambos viales, no solo aumentan los niveles de hidratación, también se mejora el tono de la piel gracias a las propiedades que aporta el vial Vitamin Concentrate.



Repair Treatment 6x4 ml



Vitamin Concentrate 20x2 ml

HIDRATANTE

Número de sesiones	Producto utilizado
1ª SESIÓN	Repair Treatment 4 ml.
2ª SESIÓN	Repair Treatment 0.5 ml. + Vitamin Concentrate 2 ml. + Glow Up Treatment 1.5 ml.
3ª SESIÓN	Repair Treatment 0.5 ml. + Vitamin Concentrate 2 ml. + Lifting Treatment 1.5 ml.
4ª SESIÓN	Repair Treatment 0.5 ml. + Vitamin Concentrate 2 ml + Glow Up Treatment 1.5 ml.
5ª SESIÓN	Repair Treatment 4 ml.

COMBINACIONES PROPUESTAS POR TAHĚSTHETIC

REGENERANTE – DESPIGMENTANTE

Un tratamiento indicado para mejorar las marcas, cicatrices y el estado general de la piel.

Este tratamiento combina una serie de activos que permite aclarar la mancha, inhibir la actividad de la melanina y estimular la piel para impedir su oxidación. Con este tratamiento se consigue una mejora del tono y del envejecimiento prematuro.



Repair Treatment 6x4 ml



Glow up Treatment 6x4 ml



Vitamin Concentrate 20x2 ml

REGENERANTE-DESPIGMENTANTE

Número de sesiones	Producto utilizado
1ª SESIÓN	Repair Treatment 2 ml. + Glow Up Treatment 2 ml.
2ª SESIÓN	Vitamin Concentrate 2 ml.+ Repair Treatment 1 ml + Glow Up Treatment 3 ml.
3ª SESIÓN	Vitamin Concentrate 2 ml + Glow Up Treatment 2 ml.
4ª SESIÓN	Vitamin Concentrate 2 ml. + Repair Treatment 1 ml. + Glow Up Treatment 3 ml.
5ª SESIÓN	Repair Treatment 2ml + Glow Up Treatment 2 ml.

COMBINACIONES PROPUESTAS POR TAHĚSTHETIC

REVITALIZANTE

Tratamiento con efecto antiedad que reduce las arrugas, no solo al instante, sino de manera prolongada en el tiempo ya que introduce una serie de activos que seguirán trabajando de manera ininterrumpida en el interior de la piel.



Repair Treatment 6x4 ml



Vitamin Concentrate 20x2 ml



Anti-aging Treatment 6x4 ml



Glow up Treatment 6x4 ml



Lifting Treatment 6x4 ml

REVITALIZANTE

Número de sesiones	Producto utilizado
1ª SESIÓN	Repair Treatment 2 ml. + Vitamin Concentrate 2 ml.
2ª SESIÓN	Vitamin Concentrate 2 ml. + Antiaging Treatment 0.5 ml. + Glow Up Treatment 1.5 ml.
3ª SESIÓN	Repair Treatment 0.5 ml. + Vitamin Concentrate 1.5 ml. + Antiaging Treatment 0.5 ml. + Glow Up Treatment 1.5 ml.
4ª SESIÓN	Vitamin Concentrate 2 ml. + Antiaging Treatment 0.5 ml. + Lifting Treatment 1.5 ml.
5ª SESIÓN	Antiaging Treatment 4 ml.

COMBINACIONES PROPUESTAS POR TAHĚSTHETIC

REAFIRMANTE

Tratamiento para la mejora de las microarrugas gracias a la activación de los fibroblastos y una pequeña paralización muscular que evita marcar las líneas de expresión de manera prolongada.



Repair Treatment 6x4 ml



Rose Gold Treatment 6x4 ml



Anti-aging Treatment 6x4 ml



Lifting Treatment 6x4 ml



Glow up Treatment 6x4 ml

REAFIRMANTE

Número de sesiones

Producto utilizado

1ª SESIÓN

Repair Treatment 2 ml. + Rose Gold Treatment 2 ml.

2ª SESIÓN

Antiaging Treatment 2ml. + Lifting Treatment 2 ml.

3ª SESIÓN

Rose Gold Treatment 2 ml. + Lifting Treatment 2 ml.

4ª SESIÓN

Repair Treatment 2 ml. + Antiaging Treatment 2 ml. + Lifting Treatment 2 ml.

5ª SESIÓN

Repair Treatment 2 ml. + Lifting Treatment 2 ml.

COMBINACIONES PROPUESTAS POR TAHĚSTHETIC

ROSE GOLD

El oro coloidal "ROSE GOLD" se incluye en formulaciones cosméticas avanzadas como el mejor activo cosmético rejuvenecedor. Potencia la luminosidad y unifica su tono, actúa como antioxidante y facilita la eficacia del resto de activos presentes en la fórmula.

No existe un tratamiento similar ya que es una perfecta combinación de todos los activos para conseguir mejorar el estado general de la piel en tan solo 6 sesiones, trabajando la hidratación, regeneración, elevación y conservación de la piel.

- El oro como escudo protector del péptido Acetyl Heptapeptide-9.
- Estimula la síntesis de proteínas de la matriz extracelular y el metabolismo dérmico.
- Hasta 55% de reducción de arrugas in vivo.
- Hasta 30 horas de péptidos activos.

6 sesiones totales (cada 10 o 15 días)

ROSE GOLD

Número de sesiones

Producto utilizado

1ª SESIÓN

Repair Treatment 2 ml. + Vitamin Concentrate 2 ml.

2ª SESIÓN

Glow Up Treatment 2 ml. + Anti aging Treatment 2 ml.

3ª SESIÓN

Repair Treatment 2 ml. + Glow Up Treatment 2ml + Rose Gold Treatment 2 ml.

4ª SESIÓN

Rose Gold Treatment 2 ml. + Glow Up Treatment 2 ml.

5ª SESIÓN

Repair Treatment 2 ml. + Rose Gold Treatment 2ml + Glow Up Treatment 2 ml.

6ª SESIÓN

Rose Gold Treatment 4 ml.



Repair Treatment 6x4 ml



Vitamin Concentrate 20x2 ml



Anti-aging Treatment 6x4 ml



Glow up Treatment 6x4 ml



Rose Gold Treatment 6x4 ml

Consideraciones para todos los tratamientos



Repair Treatment 6x4 ml



Vitamin Concentrate 20x2 ml



Anti-aging Treatment 6x4 ml



Glow up Treatment 6x4 ml



Lifting Treatment 6x4 ml



Rose Gold Treatment 6x4 ml

- Después de cada sesión, masajearmos el exceso de producto, si es que hubiese, para que se absorba por completo.
- Se recomienda finalizar todas las sesiones con 1,25 ml de **Shooting Facial Mask**, masajearlo para favorecer su absorción y, a continuación, aplicar generosamente la protección solar **Sun Cream spf 50+**.
- Ten presente que la mayoría de los viales se absorben por completo tras masajearlos, sin embargo, en aquellos cuya viscosidad sea mayor, puede quedar algo de residuo en la piel. En estos casos, se recomienda aplicar la mascarilla 7.5 ml de **Shooting Facial Mask**, dejarla actuar 10 minutos y retirarla por completo trascurrido este tiempo.
- Para finalizar el tratamiento, se recomienda aplicar como en todos los casos, 1,25 ml de **Shooting Facial Mask**, masajearla hasta que se absorba por completo y finalizar aplicando generosamente la protección solar **Sun Cream spf 50+**.
- En los casos en los que la piel quede más enrojecida, podemos aplicar también este mismo procedimiento con 7.5 ml de **Shooting Facial Mask** y dejarla actuar hasta que la piel se calme, unos 10 minutos. Terminar el tratamiento del mismo modo que siempre: aplicando 1.25 ml de la misma mascarilla y la protección solar **Sun Cream spf 50+**.



Soothing Facial Mask 100 ml



Sun Cream spf 50+ 100 ml



TAHÆSTHETIC
PROFESSIONAL